

Il contenuto di questo documento è di proprietà della ditta General Auto S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La documentazione è redatta da Studio Europa S.r.l. La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.

Istruzioni d'uso e manutenzione

1 Nome e codice

Mascherina medica XM757

2 Applicazione

Limitazione della trasmissione di agenti infettivi. Dispositivo medico

3 Indicazioni

La mascherina medica XM757 è progettata e realizzata allo scopo di limitare la trasmissione di agenti infettivi e garantire la protezione delle vie respiratorie. Realizzata in triplo strato di TNT

4 Classe di protezione

Mascherina di Tipo II – Classe I Direttiva 93/42/CEE

5 Norme tecniche applicate

UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993:2010
Test Report n° 1_07/10/2020

6 Scadenza

Se conservato nella custodia originale, 4 anni dalla data di costruzione riportata sull'etichetta.

7 Imballaggio

Involucro in plastica sigillata e/o in scatole di cartone. Elemento riciclabile secondo normativa vigente.

8 Simbologia

Temperatur a ambiente stoccaggio Costruttore Data Fabbricazione Scadenza Umidità ambiente di stoccaggi Non riutilizzare Non sterile Lotto Non disperdere nell'ambiente



9 Istruzioni d'uso



1. Lavarsi bene le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina
2. Controllare che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi/discontinuità
3. (opzionale) Distendere, se provvista di nasello, la mascherina tenendo la parte più rigida verso l'alto
4. Tenere la mascherina per gli elastici e tenderli dietro le orecchie
5. Verificare che la mascherina aderisca bene al viso coprendo naso bocca e mento
6. (Opzionale) Se prevista di nasello, far aderire lo stesso al profilo del naso.

10 Avvertenze

Verificare l'integrità della mascherina prima dell'uso. Se presenti lacerazioni e/o macchie utilizzare una maschera sostitutiva. Se risulta impossibile ottenere un'adeguata adesione della mascherina al profilo del volto, non entrare in ambienti di rischio potenziale. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in questa nota può indurre ad un uso errato del dispositivo e causare malattie e morte. Utilizzare la mascherina solo per l'uso consentito. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno per sostenere la vita. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare in atmosfera dove c'è pericolo d'esplosione o gas tossici. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (a) la respirazione diventa difficoltosa, o (b) si avvertono senso di angoscia o vertigini. Peli di barba, ed affezioni respiratore possono ridurre l'efficienza di queste semi-maschere filtranti. Non modificare od alterare in nessun modo il dispositivo sanitario. Solo monouso. Non richiede manutenzione. Scartare dopo il singolo utilizzo. Conservare le mascherine non ancora utilizzate nella loro confezione integra in ambiente lontano dalla luce del sole.

11 Produttore

General Auto S.r.l. Sede: Via Prof. Filippo Manna, 31 – 80013 Casalnuovo (NA) P.iva 00326830635 - Prodotto fabbricato in Italia

12 Dichiarazione di Conformità

Visionabile sul sito del fabbricante: www.xenergyitalia.it